

FORMADES GF



CE 0482



ALKOHOLFREIE GEBRAUCHSFERTIGE SCHNELLEDESINFEKTION

- hoher Reinigungseffekt
- kurze Einwirkzeit

Produktbeschreibung

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte geeignet. Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. FORMADES GF enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole.

Anwendungsbereiche

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozid-Richtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und medizinischem Inventar.

Anwendung

Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Mit passendem Schaumprüchkopf auch als aerosolfreier Schaum applizierbar.

Konzentration und Einwirkzeiten

Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid (*C. albicans*)
gem. DGHM/VAH: unverdünnt. 1 min.*

Inaktivierung von behüllten Viren wie HBV/HIV/HCV/
BVDV/Vakzinia-Virus (begrenzt viruzid): unverdünnt. 1 min.

*gelistet in der 5 min. Spalte der VAH-Liste

Wirkungsspektrum

Bakterizid inkl. MRSA, fungizid (*C. albicans*) HIV, HBV, HCV, BVDV, Vakzinia-Virus inaktivierend

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 0,5 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-18-alkyldimethyl-, Chloride.

Lieferformen

Einzelabpackung
1-Liter-Handsprühflasche
5-Liter-Kanister

Dosierhilfen

- Sprühkopf für 1-Liter-Handsprühflasche
- Kanisterumfüllhahn
- Schaumprüchkopf mit Adapter für 1-Liter-Flasche

Besondere Hinweise

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

FORMADES GF



CE 0482



ALKOHOLFREIE GEBRAUCHSFERTIGE SCHNELLEDESINFEKTION

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/ Main:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/
VAH-Richtlinien, 12.07.2010.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Bischofshofen:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/
VAH-Richtlinien, 13.07.2010.

Listung / Registrierung

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.

Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA-Reg.-Nr.: N-41348.

Gelistet in der aktuellen VAH-Desinfektionsmittelliste.

Stand: 08/11